

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, použitím alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	3 x 1,5 V AA batérie
Rozsah merania	0 - 5‰BAC
Presnosť merania	Presnosť: $\pm 0,08$ ‰ pri hodnotách 0,20–0,5 ‰ BAC, 20 % pri hodnotách nad 0,5 ‰ BAC


POPIS ZARIADENIA

1. Náustok
2. Displej
3. Zap/Vyp (POWER)
4. Tlačidlo NAHOR ↑
5. Tlačidlo DOLŮ ↓



SPUSTENIE ZARIADENIA

1. Vložte batérie do priestoru pre batérie.
2. Stlačte tlačidlo POWER na zapnutie zariadenia.
3. Po zapnutí prebehne autotest – hodnoty na displeji sa rozsvietia približne na 2 sekundy.

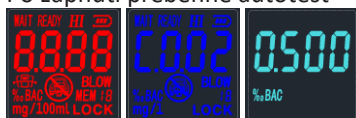

Po dokončení autotestu sa zariadenie prepne na hlavnú obrazovku.




4. Vypnutie sa vykoná automaticky do 5 minút, ak nestlačíte žiadne tlačidlo, alebo podržte tlačidlo POWER približne 3 sekundy.

AKTÍVNY TEST

- Pred testovaním: Vypláchnite si ústa vodou, nejzte, nepite ani nefajčite 15 minút pred testom. Dýčajte pokojne a pravidelne.

1. Zapnite zariadenie
2. Akonáhle sa zobrazí hlavná obrazovka, stlačte tlačidlo POWER a zariadenie prejde do testovacieho režimu. Indikácia „PH“ bliká 4 sekundy a následne sa zobrazí „Ready“ (Pripravené).

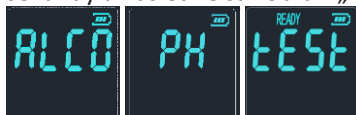

3. Umiestnite zariadenie približne 1–2 cm od úst a fúkajte rovnomerne do náustka približne 2 sekundy.
4. Na displeji sa zobrazí „BLO“ a ozve sa pípnutie.



5. Zariadenie vykoná analýzu.



6. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí výsledok.



UPOZORNENIA A POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Pred jazdou nepite!
- Výsledky testu sú iba orientačné, môžu ich ovplyvniť rôzne faktory (zápach v ústach, dym, zvyškové plyny v okolí).
- Naměřené hodnoty alkoholu slouží pouze jako orientační informace. Ani prodejce, ani výrobca nenesie žádnou zodpovednost vyplývající z používání tohoto zariadenia.
- Uistite sa, že vo vzduchu nie sú výpary alkoholu a rozpúšťadiel (dezinfekčných prostriedkov).
- Na každý test alebo na každú testovanú osobu použite nový náustok.
- Nepoužívajte zariadenie ihneď po požití alkoholu, po konzumácii jedál obsahujúcich alkohol alebo po vypláchnutí úst ústnou vodou s alkoholom.
- Držte mimo dosahu antén mobilných telefónov alebo vysielateľov.
- Pred testovaním: 15 minút pred testom nejedzte, nepite a nefajčite. Dýčajte pokojne a pravidelne. Pred testom si vypláchnite ústa vodou.
- Ak sa na displeji zobrazí indikátor vybitia batérie, vymeňte ju.

PASÍVNY TEST


1. Zapnite zariadenie
2. Akonáhle sa zobrazí hlavná obrazovka, stlačte tlačidlo POWER a zariadenie prejde do testovacieho režimu. Indikácia „PH“ bliká 4 sekundy a následne sa zobrazí „Ready“ (Pripravené).



3. Priložte zariadenie približne 1–2 cm od úst. Hovorte/dýchajte smerom k náustku.
4. Zariadenie automaticky nasaje vzorku dychu a vykoná analýzu.



5. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí výsledok. Po minúte nečinnosti alebo po stlačení tlačidla POWER sa vrátite na hlavnú obrazovku.

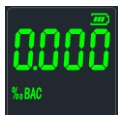


OPAKOVANÝ TEST

1. Po zobrazení výsledku stisknete tlačidlo „POWER“ pre návrat na hlavnú obrazovku.
2. Stlačte znovu tlačidlo „POWER“ na začatie nového testu.

VÝSLEDKY TESTU

- Výsledok < 0,20 ‰: výsledok napr. „0,000‰“ sa zobrazí zelenou farbou

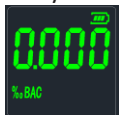

- Výsledok ≥ , úroveň alarmu 1. (nastavená trvalo na 0,200 ‰): výsledok napr. „0,39‰“ sa zobrazí žltou farbou



- Výsledok ≥ , úroveň alarmu 2. (nastavená napr. na 0,500 ‰): výsledok napr. „1,000‰“ sa zobrazí červenou farbou



ZOBRAZENIE HISTORIE TESTŮ

- Na hlavnej obrazovke podržte tlačidlo **DOLŮ** ↓ cca 2 vteřiny



- Tlačidlami **NAHORU** (↑) / **DOLŮ** (↓) prechádzajte záznamy



- Stlačením tlačidla POWER opustíte zobrazenie.

REŽIM NASTAVENÍ

- Na hlavnej obrazovke podržte tlačidlá POWER + NAHORU + DOLŮ približne 2 sekundy



- Zobrazí sa „0000“



- Pomocou tlačidiel vyberte jednotlivé číslice (popísané nižšie) a počkajte na vstup do nastavení.

Nastavenie alarmov a jednotiek

- V režime nastavení, na obrazovke s zobrazením „0000“, pomocou tlačidiel NAHORU/DOLŮ nastavte „1000“ (tlačidlom POWER meníte pozície nastavovaných čísiel) a počkajte niekoľko sekúnd, kým vstúpíte do nastavenia.



- Tlačidlom DOLŮ ↓ nastavte požadovanú jednotku: ‰ BAC, ‰ BAC alebo mg/L. Stlačte tlačidlo POWER na dve sekundy pre uloženie.



- Po cca 5 sekundách bez stlačenia kláves sa zariadenie vráti na hlavnú obrazovku



- Zariadenie má dve úrovne upozornení. **Alarm 1. úroveň** je nastavený na hodnotu 0,2‰. To znamená, že pri nameraní hladiny alkoholu 0 – 0,19‰ bude displej svietiť zeleno. Pri dosiahnutí hodnoty 0,2 ‰ alebo vyššej sa displej rozsvieti na žltó. Displej bude mať žltú farbu až do hodnoty nastavenia alarmu 2. úrovne. V režime nastavení môžete nastaviť alarm 2. úrovne podľa vašich potrieb. Napríklad na hodnotu 1,0‰. Pri dosiahnutí tejto hodnoty sa farba displeja zmení zo žltej na červenú. Ak nastavíte alarm 2. úrovne na 0,2‰ (hodnota alarmu 1. úrovne), potom sa displej pri dosiahnutí tejto hodnoty nerozsvieti na žltó, ale hneď na červeno.

Nastavenie alarmu 2. úrovne

- V režime nastavenia, na obrazovke s zobrazením „0000“, pomocou tlačidiel NAHORU/DOLŮ, pomocou tlačidla POWER meníte pozíciu nastavenia. Nastavte „2001“ a počkajte niekoľko sekúnd, kým vstúpíte do nastavenia.



- Pomocou tlačidiel NAHORU (↑) nastavte požadovanú hodnotu alarmu (napr. 1.0).



- Stlačte tlačidlo POWER na 2 sekundy pre uloženie.



Vymazanie záznamov testov

- V režime nastavení, na obrazovke s zobrazením „0000“, pomocou tlačidiel NAHORU/DOLŮ nastavte „6000“ (tlačidlom POWER meníte pozície nastavovaných čísel), zobrazí sa celkový počet vykonaných testov. Stlačte tlačidlo POWER na 2 sekundy pre uloženie a záznamy budú vymazané.



- Podržte tlačidlo DOLŮ↓, aby ste sa uistili, že záznamy boli vymazané.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chyba	Príčina	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť	Vybitá batéria alebo nesprávna polarita	Skontrolujte batérie, prípadne ich vymeňte
Tlačidlo nefunguje	Vadný kontakt alebo tlačidlo	Kontaktujte servis
Namerať hodnoty bez požitia alkoholu	Zvyšková hodnota alebo alkohol v ústach	Počkajte 15 sekúnd a test opakujte
Nenamerené hodnoty po požití alkoholu	Vzdialenosť úst od náustku alebo vadný senzor	Fúkajte bližšie alebo vymeňte náustok
Po teste nesvieti indikátor	Vadný alebo odpojený indikátor	Kontaktujte servis

REKALIBRÁCIA ZARIADENIA

Zariadenie je presné približne 1 rok. Pri častom používaní je potrebné kalibrovať častejšie. Odporúča sa kalibrovať každých 12 mesiacov (alebo skôr). Kontaktujte autorizovaný servis alebo predajcu.

Na výrobok je vystavené vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na www.solight.sk.



Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.