

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš prístroj. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	USB 5,0 V (nabíjanie pomocou priloženého kábla, adaptér nie je súčasťou dodávky)
Displej	OLED
Typ snímača	Elektrochemický (Fuel Cell Sensor)
Jednotky	‰ BAC, % BAC, mg/l
Presnosť merania	±0,08 ‰ BAC pri koncentráciách 0,20 - 0,50 ‰ BAC ±20 % pri koncentráciách nad 0,50 ‰ BAC
Rozsah merania	0 - 5 ‰ BAC
Prevádzková teplota	0 °C až 60 °C
Kalibrácia	Každých 12 mesiacov / po 500 meraniach


POPIS ZARIADENÍ

1. Nástok
2. Vstup USB
3. Displej
4. Zap/Vyp (Power)
5. Indikátor nabíjania




SPUSTENIE A OVLÁDANIE ZARIADENIA


POZNÁMKA: Ak sa na obrazovke zobrazí "TEST" alebo iné rozhranie, stlačte tlačidlo POWER na približne 3 sekundy, aby ste zariadenie vypli. Zariadenie opäť zapnite.

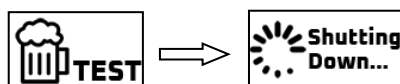

1. Pripojte kábel USB na nabíjanie zariadenia.
 - Červená kontrolka signalizuje nabíjanie.
 - Zelený indikátor signalizuje, že zariadenie je nabité.
 - Blikajúci indikátor signalizuje, že zariadenie je potrebné nabiť.
2. Podržte tlačidlo POWER približne 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli.

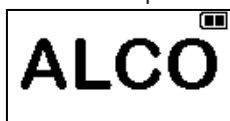


3. Stlačením tlačidla POWER na približne 3 sekundy zariadenie vypnete.

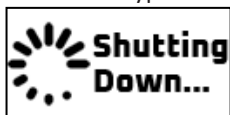

UPOZORNENIA A POUŽÍVANIE ZARIADENIA


- Pred jazdou nepite alkohol!
- Výsledky testu sú len orientačné, môžu byť ovplyvnené rôznymi vplyvmi (zápach z úst, dym, zvyškové plyny v prostredí).
- Namerané hodnoty alkoholu sú len orientačné. Predajca ani výrobca nenesú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z používania tohto zariadenia.
- Uistite sa, že vzduch je bez výparov alkoholu a rozpúšťadiel (dezinfekčných prostriedkov).
- Na každý test alebo pre každú testovanú osobu použite nový náustok.
- Prístroj nepoužívajte bezprostredne po konzumácii alkoholu/fajčení cigariet, po konzumácii potravín obsahujúcich alkohol alebo po vyplachovaní úst ústnou vodou obsahujúcou alkohol.
- Držte sa ďalej od antén alebo vysielačov mobilných telefónov.
- Pred testovaním: 15 minút pred testovaním nejedzte, nepite ani nefajčite. Dýchajte pokojne a pravidelne. Pred testom si vypláchnite ústa vodou.
- Ak sa na displeji zobrazí indikátor slabej batérie, vymeňte batériu.
- Po troch testoch počkajte 5 minút na ďalší test.
- Skladujte pri izbovej teplote bez vysokej vlhkosti.
- Ak je rozdiel medzi dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami >0,1 ‰ (0,01 %), používateľ by mal vykonať nové meranie.
- Pre kalibráciu kontaktujte výrobcu.

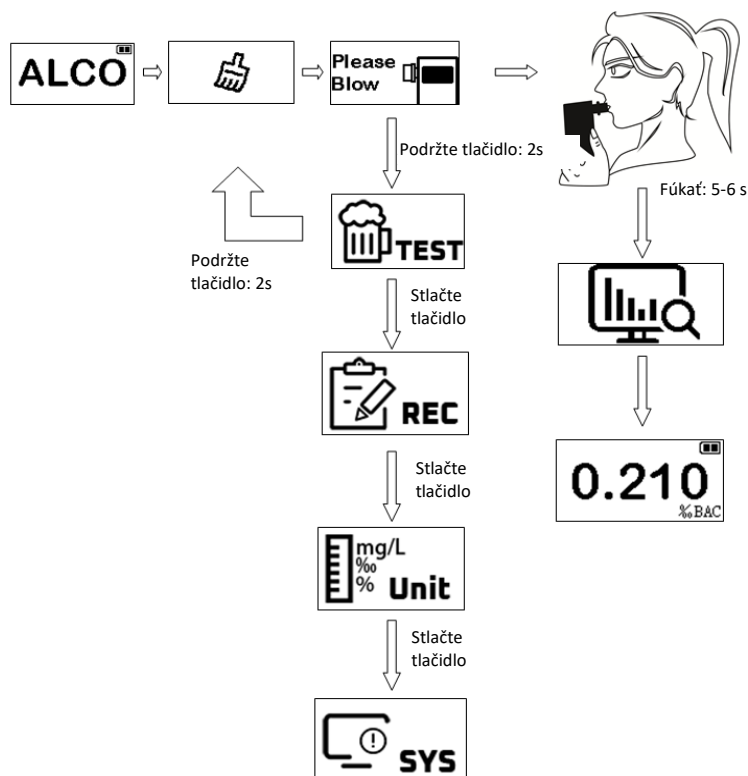

MERANIE ALKOHOLU V DYCHU

1. Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí "ALCO" a senzor sa aktivuje. Počas procesu čistenia bude blikať ikona  "cleaning" (čistenie), potom sa zobrazí "Please Blow" (Fúkajte, prosím), čo znamená, že zariadenie je pripravené na odber vzorky. Môžete vykonať test. Ak sa test nevykoná, prístroj sa po 60 sekundách automaticky prepne do Menu.
2. Fúkajte nepretržite do náustka približne 5 až 6 sekúnd. Prístroj automaticky rozpozná váš dych a počas fúkania vydá rýchly "pípavý" zvuk. Hneď ako budete počuť pípnutie "Beep! Beep!", prestaňte fúkať.
3. Ak bol odber vzorky dychu úspešný, ikona  "analyzuje" bude blikať a potom sa zobrazí výsledok merania.
4. Ak je čas fúkania príliš krátky, prúd vzduchu je príliš slabý alebo je fúkanie prerušené, na displeji sa zobrazí správa "Flow error!" (Chyba prietoku). (Chyba).
5. Po zobrazení hlásenia "Flow error!" na niekoľko sekúnd, prístroj sa automaticky vráti do režimu merania s výzvou "Please Blow".
6. Výsledok testu zostane na displeji približne 60 sekúnd. Ak chcete vykonať nový test, raz stlačte tlačidlo napájania.
7. Ak sa počas 60 sekúnd nevykoná žiadna akcia, prístroj sa automaticky vypne.

POZNÁMKA: Počas testovania nezakrývajte tento otvor.

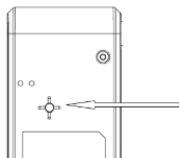

FUNKCIA PAMÄTE ZÁZNAMU

- Prístroj ukladá do pamäte 2000 výsledkov.
1. Vstúpte do ponuky záznamu "REC" (pozri obrázok vyššie - OPERATION).
 2. Stlačením tlačidla zobrazíte uložené hodnoty.


POZNÁMKA: Prístroj môže obsahovať niektoré záznamy, pretože sa testuje počas výroby.

JEDNOTKY MERANIA A NASTAVENIE ÚROVNE VÝSTRAHY

1. Vstúpte do ponuky "UNIT" (Jednotka) nastavenia jednotiek (pozri obrázok vyššie - OPERATION (Prevádzka)).
2. Ikona jednotky začne blikať. Stlačením tlačidla prepínate medzi jednotkami: ‰ BAC / ‰BAC / mg/L
3. Ak chcete uložiť zvolenú jednotku, podržte tlačidlo 2 s. Na displeji sa zobrazí "Save Unit" (Uložiť jednotku).



4. Hodnota výstražnej úrovne začne blikať

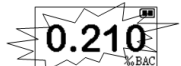

5. Stlačením tlačidla zmeníte nastavenie
Např. 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 ‰ BAC (na LED sa zobrazí varovanie)
6. Podržaním tlačidla na 2 sekundy sa nastavenie uloží - na displeji sa zobrazí "Save Warning" (Uložiť výstrahu). Prístroj sa potom vráti do režimu Menu.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.