

Postupujte podľa obrázků na príloženém návodu k balení filtrační polomasky.



- 1) Uchopte masku do ruky a cez nosovú sponu obleč dopredu upínacie pásky a masku prilož na nos a ústa,
- 2) pretiahnite upínacie pásky cez hlavu - najskôr spodné na krk
- 3) a potom horný na tylo hlavy,
- 4) opatrne vytvarujte nosovú sponu tak, aby priliehala tesne k nosu a prispôsob masku tak, aby si dosiahol dobrý posadenie tesniace línie na tvári,
- 5) otestuj tesnosť vydýchnutím vzduchu cez masku. Ak vzduch prechádza okolo nosovej spony alebo inokade, musí byť táto netesnosť odstránená ešte pred vstupom do zamorenej oblasti.

Respirátory značené KN95 sú respirátory rovnakej triedy ako FFP2. Celková účinnosť filtrácie:  $\geq 95\%$  Tento výrobok neposkytuje ochranu proti plynom alebo pri nedostatku kyslíka v ovzduší! Užívať respirátor možno iba v dobre vetraných priestoroch s dostatočným obsahom kyslíka v ovzduší ( $> 19$  obj.%). Respirátor nemožno použiť v prípade ak koncentrácia nebezpečných alebo toxických látok je neznáma alebo životu nebezpečná. Respirátor musí byť vymenený, ak je poškodený, zdeformovaný alebo dýchacie odpor prekročí pohodovú úroveň. Opustite pracovnú oblasť ihneď, ak sa u vás vyskytnú nejaké ťažkosti v dýchaní, závrat alebo spozorujete iné významné nepohodlie. Respirátor uchovávajte na suchom a chladnom (nie mrazivom) mieste. Použitý respirátor likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Použitie respirátora vo výbušnom prostredí nie je dovolené. Fúzy alebo vlasy zasahujúce do tesniacej línie respirátora môžu mať významný vplyv na netesnosť respirátora.

Dátum expirácie: 05/2023